

## FAÇONNEZ-LE À VOTRE FAÇON

Des solutions uniques et innovatrices  
à vos besoins chirurgicaux

### Barrière de comblement CALFORMA® de sulfate de calcium

#### Protéger votre greffe osseuse n'aura jamais été aussi SIMPLE...

CalForma fonctionne comme une barrière de comblement en permettant de garder les fragments d'une greffe osseuse dans le défaut tout en empêchant l'accès aux cellules indésirables, les bactéries et les débris qui risquent d'occuper l'espace du défaut avant que la régénération osseuse ait lieu. Une fois préparé, CalForma peut être manipulé à la main et être modelé facilement pour épouser la surface du défaut.

La préparation comprend:

- Sulfate de calcium semi-hydraté alpha
- Hydroxylpropylméthylcellulose (HPMC)
- Solution hydratante

#### Avantages cliniques de CALFORMA:


- Offre une barrière pour plusieurs types de défauts.
- Caractéristiques de manipulation inchangées en présence de sang et de salive.
- Se résorbe sur une période de 4 à 6 semaines sous forme de composantes naturelles retrouvées dans le corps humain.
- Lorsque la fermeture primaire n'est pas possible, les tissus mous migreront au dessus de la barrière CalForma entre 1-3 semaines.
- Diminue la durée de l'intervention chirurgicale.




Visser la tige du piston dans la seringue et vider toute la solution hydratante. Bien mélanger.



Retirer la formule préparée et façonner dans la forme désirée.

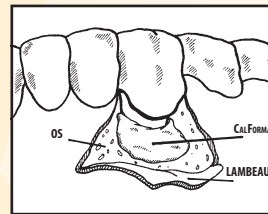

Placer immédiatement CALFORMA en lissant rapidement mais légèrement les rebords à l'aide de la spatule.

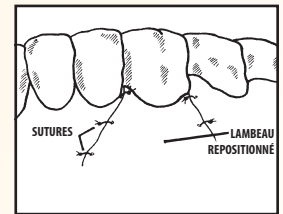

Repositionner et suturer le lambeau. CALFORMA se solidifiera en moins de 4 minutes.

