

FLEXIBILITÉ ET RÉSULTATS SANS PAREIL!

*Des solutions uniques et innovatrices
à vos besoins chirurgicaux*

Liant CalMatrix® de sulfate de calcium pour greffe osseuse

La mise en place de votre greffe osseuse n'aura jamais été aussi facile...


Combiné au granules de greffe osseuse de votre choix, CalMatrix forme un composite ayant la consistance du mastic, facilitant ainsi le comblement des défauts. La malléabilité de CalMatrix lui permet d'épouser les contours de la surface des défauts osseux et parodontaux.

La préparation comprend:


- Sulfate de calcium semi-hydraté alpha
- Carboxyméthylcellulose sodique
- Solution hydratante

Avantages cliniques de CalMatrix:

- Réduit le risque de migration des particules de greffe osseuse.
- Son temps de résorption correspond à celui de la formation osseuse. Il maintient ainsi l'espace permettant la régénération d'os vital.
- Forme une structure stable en présence de fluide.
- Ses particules de dimension uniforme, sa forme et sa structure offrent au clinicien des résultats prévisibles.

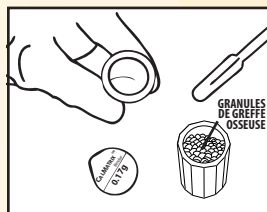


Mélanger CalMatrix aux granules de greffe osseuse de votre choix.

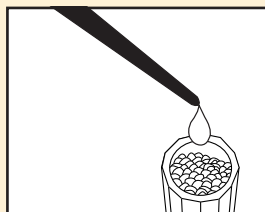

Ajouter la solution hydratante de la seringue et bien mélanger à l'aide de la spatule.



Façonner le mélange de greffe osseuse dans la forme désirée.

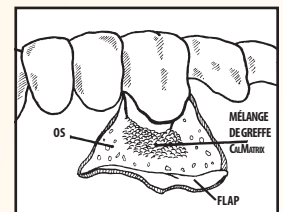

Compacter la totalité du mélange de greffe dans le site ou le placer en plusieurs couches.

